

COME AIUTARE UNA VITTIMA DI ARRESTO CARDIACO

Un arresto cardiaco improvviso può accadere ovunque, in qualsiasi momento. Quando accade, il cuore smette inaspettatamente di battere correttamente e la migliore possibilità di sopravvivenza della vittima dipende da una rianimazione cardiopolmonare immediata e un soccorritore con un defibrillatore (DAE).
Non farti prendere dal panico. Puoi essere d'aiuto.

COME PUOI ESSERE D'AIUTO

Linee guida ERC 2021 Basic Life Support

Verifica la sicurezza della scena

Controlla la reattività della vittima

Chiama i Servizi di Emergenza

Libera le vie aeree della vittima

Controlla il respiro

Inizia la RCP

Quando sarà disponibile il defibrillatore, segui le sue indicazioni audio e visive

COME ZOLL PUÒ ESSERE D'AIUTO


DAE ZOLL® con Feedback sulla RCP in tempo reale




Controlla la reattività della vittima:
"Stai bene?"



Chiama i Servizi di Emergenza

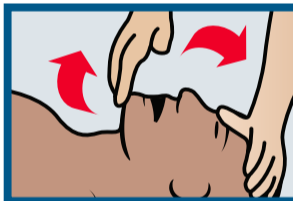


Libera le vie aeree della vittima,
controlla il respiro.

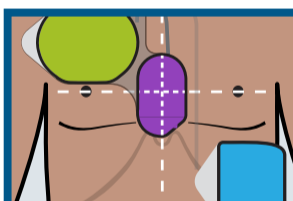

"Attaccare gli elettrodi DAE al torace nudo del paziente"




"Non toccare il paziente,
analisi in corso"

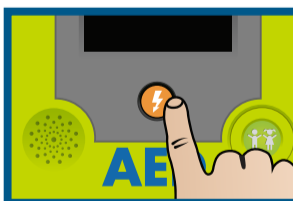

Se la scarica è consigliata: "Premere il pulsante di scarica lampeggiante"



Se la scarica non è consigliata o dopo l'erogazione della scarica: "Inizia la RCP"

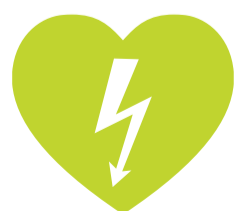

Non tutti i DAE sono uguali. I DAE ZOLL forniscono supporto durante tutto il processo di RCP con guida in tempo reale e feedback su frequenza e profondità di compressione. Tutto questo aiuta i soccorritori a fornire la migliore RCP possibile per aumentare le possibilità di sopravvivenza di una vittima.